

Prothèses amovibles numériques

Passez au niveau supérieur



VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX

Fabriquez rapidement et à moindre coût des prothèses partielles flexibles pour une utilisation temporaire grâce à l'impression 3D.





Prothèse amovible numérique

VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX

Matériau d'impression 3D pour la fabrication de bases prothétiques flexibles

La prothétique numérique offre aujourd'hui bien plus que des prothèses complètes : VITA VIONIC BASE RESIN FLEX permet de fabriquer des prothèses partielles flexibles pour une utilisation temporaire, avec précision, efficacité et confort. Insufflez une nouvelle légèreté dans votre quotidien au laboratoire. Fabriquez des restaurations rentables, de façon rapide et fiable. Le processus de fabrication numérique garantit un travail efficace et permet la production reproductible de plusieurs prothèses partielles en une seule impression. Le matériau flexible offre un grand confort et répond au souhait de nombreux patients en faveur de restaurations sans métal. Les variantes de couleurs transparentes laissent transparaître la teinte personnalisée des gencives et contribuent ainsi à une esthétique naturelle. Autre avantage : les prothèses à crochets imprimées sont réparables et extensibles. Par rapport aux procédés d'injection classiques, elles sont également beaucoup plus faciles à polir.

Profitez de matériaux parfaitement adaptés les uns aux autres, dans la qualité bien connue de VITA. Faites confiance à des flux de travail sûrs, combinés à une multitude d'imprimantes et d'unités de post-polymérisation validées.



[Consulter la liste de validation](#)



Économiques

Fabrication efficace, économe en matériaux et peu coûteuse de prothèses partielles flexibles pour une utilisation temporaire - avec une qualité reproductible et un gain de temps notable.

Confortable

Matériau flexible, sans métal, à l'esthétique naturelle et très confortable à porter. La couleur transparente laisse transparaître la teinte personnalisée des gencives, tout en permettant de réparer et d'étendre la prothèse.

Simple

Des flux de travail sûrs grâce à la liaison chimique entre la base et les dents, une bonne finition et un polissage haute brillance.



« Grâce à VITA VIONIC BASE RESIN FLEX, je peux concevoir et fabriquer des prothèses partielles plus rapidement, de façon plus précise et économique. Les patients apprécieront le confort et l'esthétique naturelle – pas de crochets métalliques, pas de compromis. Une innovation qui profite à tous. »

Darius Northey
All Smiles Denture Clinic, Australie

Combinaison astucieuse.

Niveau Economy

Flux de travail pour une impression 3D efficace

- 1) Impression de la base prothétique et des dents
- 2) Lavage
- 3) Vérification de l'ajustement
- 4) Collage à l'aide de la résine
- 5) Polymérisation
- 6) Polissage

Votre avantage : des restaurations imprimées de qualité solide, économiques et rapides à réaliser.



Niveau Smart

Flux de travail pour la combinaison avec des dents fraisées

- 1) Impression de la base prothétique, lavage, polymérisation
- 2) Fraisage et séparation des dents
- 3) Vérification de l'ajustement
- 4) Préconditionnement avec Primer
- 5) Collage à l'aide de la résine
- 6) Polymérisation
- 7) Polissage

Votre avantage : dégradé de couleurs intégré et polissage facile des dents pour une esthétique améliorée.



Comparaison des types de fabrication

Critères d'évaluation	Conception numérique	Adap-tation	Matériau homogène	Réparable et extensible	Résistance à la rupture Flexibilité	Aptitude au polis-sage / haute brillance	Temps de production	Expédi-tion	Coûts
Imprimer avec VITA VIONIC BASE RESIN FLEX	✓ Oui Basé sur CFAO	✓ Bonne	✓ Oui après avoir bien agité	✓ Oui	●●○	●●○ Bonne aptitude au polissage	●●● Procédé plus rapide	●●● Sec et stable	€ Faible
Fraisage	✓ Oui Basé sur CFAO	✓ Très bons	✓ Oui	✗ Non	●○○	●●● Très bonne aptitude au polissage	●●○ Modéré	●●● Sec et stable	€€€ Élevé
Injection convention-nelle	✗ Non manuellement	✗ Limité	✗ Non	✗ Non	●●●	●○○ Polissage exigeant	●○○ Chrono-phage	●○○ Dans l'eau	€€ Moyenne



Des solutions adaptées en cours de processus.



1. Procédé de CAO

Dans le module pour prothèses complètes à l'aide de la bibliothèque de dents artificielles VITA VIONIC DIGITAL VIGO ou dans le module pour prothèses partielles



2. Fabrication de la base prothétique

VITA VIONIC BASE RESIN FLEX



3. Impression ou fraisage des dents prothétiques

VITA VIONIC DENT RESIN ou
VITA VIONIC DENT DISC multiColor



4. Collage

VITA VIONIC BASE RESIN FLEX



D'autres solutions de flux de travail sont disponibles ici



5. Personnalisation

VITA AKZENT LC, VITA VM LC *flow*



Nous sommes à votre disposition pour toute aide complémentaire.

Assistance téléphonique et support

Téléphone +49 7761 562-884
Fax +49 7761 562-299
8 h - 17 h (HEC)
info@vita-zahnfabrik.com

Assistance téléphonique technique VITA Amérique du Nord

États-Unis : +1 800-828-3839
Assistance technique États-Unis :
+1 888-249-1640
info@vitanorthamerica.com

Assistance téléphonique technique

Téléphone +49 7761 562-222
Fax +49 7761 562-446
8 h - 17 h (HEC)
info@vita-zahnfabrik.com

Assistance téléphonique VITA Canada

Canada : +1 800-263-4778
Assistance technique Canada :
+1 800-324-6224



N.B.

Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Publication de cette brochure produit : 01/26

Cette nouvelle édition de la notice rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik est certifié et les produits suivants portent le marquage

CE 0124 : VITA VIONIC® DENT DISC multiColor,
VITA AKZENT® LC und VITAVM® LC *flow*

detax GmbH est certifiée selon la réglementation sur les dispositifs médicaux et les produits suivants portent le marquage

CE 0483 : VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX,
VITA VIONIC® DENT RESIN

Les produits/systèmes d'autres fabricants cités dans ce document sont des marques déposées des fabricants respectifs.

MD



Pour de plus amples informations sur VITA VIONIC BASE RESIN FLEX, scannez le code QR
<https://hs.vita-zahnfabrik.com/fr/vita-vionic-base-resin-flex>



VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX

 **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG**

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

